

## **Uputstvo za upotrebu medicinskog sredstva**

### **Alveogyl**

Hemostatski hirurški zavoj

---

#### **SASTAV**

Penghawar djambi; eugenol; natrijum-lauril-sulfat; kalcijum-karbonat; ukus mentola, pomoćne supstance.

#### **OSOBINE**

ALVEOGL je pasta, sa Penghawar vlaknima, koja služi kao hirurški zavoj posle ekstrakcije zuba. Pasta obezbeđuje hemostazu kompresijom i štiti od superinfekcije (zapaljenja kosti alveole) efektom barijere.

Uneta u alveolu, ALVEOGL pasta lako adherira za strane alveole zahvaljujući svojoj fibroznoj konzistenciji.

Uz pomoć pokreta jezika pacijenta, pasta se postepeno samoeliminiše, bez intervencije stomatologa, kada započne fiziološko zarastanje rane.

ALVEOGL se veoma jednostavno postavlja i ne zahteva dodatnu pažnju stomatologa, sem posmatranja procesa zarastanja rane.

#### **INDIKACIJE**

ALVEOGL je pasta koja se koristi u slučajevima suve alveole (alveole bez ugruška) ili kao postekstrakcioni hirurški zavoj posle teške ili traumatske ekstrakcije zuba, kod pacijenata koji su ranije imali suhu alveolu.

#### **KONTRAINDIKACIJE**

ALVEOGL ne treba koristiti kod pacijenata alergičnih na neki od sastojaka paste, kao i posle vađenja mlečnih zuba (kod dece mlađe od 12 godina).

ALVEOGL ne bi trebalo koristiti kao rutinski zavoj posle svake ekstrakcije zuba.

#### **UPUTSTVO ZA UPOTREBU**

Uzmite malu količinu paste (oko 0,20 g) i lagano je postavite u već pripremljenu alveolu. Ranu nemojte ušivati.

#### **POSEBNA UPOZORENJA I MERE OPREZA PRILIKOM UPOTREBE**

Pacijente treba upozoriti da ne ispiraju intenzivno usnu duplju 24 časa nakon avulzije. Nemojte tretirati više od pet zuba po seansi. Upozorenja:

- Sadrži eugenol i ukus mentola ((S)-p-menta-1,8-dien)
- Može prouzrokovati ozbiljnu iritaciju očiju
- Može izazvati alergijsku reakciju na koži
- Toksičan za vodene organizme, može da uzrokuje dugoročne neželjene efekte u vodenom okruženju. Za detaljnije informacije, videti bezbednosnu listu.

#### **PAKOVANJE**

Bočica sadrži 10 g paste.

#### ***Samo za profesionalnu stomatološku upotrebu***

**Proizvođač:** SEPTODONT, 58 rue du Pont de Créteil, 94107 Saint-Maur-des-Fosses, Cedex, Francuska

**Ovlašćeni predstavnik proizvođača:** Polifarm d.o.o. Beograd, Zlatiborska 2V

**Broj Rešenja o registraciji:** 515-02-02865-20-003 od 23.10.2020.

---

 SEPTODONT

58, rue du Pont de Créteil  
94107 Saint-Maur-des-Fossés Cedex - Francuska  
10/19

