

Endomethasone N

Cement za punjenje korenskog kanala

SASTAV

Hidrokortizon acetat..... 1,0g
Timol jodid, barijum sulfat, cink oksid, magnezijum stearat... 100,0g

SVOJSTVA

Da bi se ponašale kao savršeni materijal za punjenje korenskog kanala, paste ne sme da se resorbuju kada se stvrdnu niti da se povlače tokom godina.

Ove paste treba da budu vidljive na rendgenu i da se jednostavno ubacuju u kanal.

ENDOMETNASONE N prašak ima sve kvalitete koji su gore navedeni.

Pored toga, ovo medicinsko sredstvo ima pomoćnu antiinflamatornu aktivnost zbog prisustva hidrokortizon acetata.

PERFORMANSE

Punilac korenskih kanala može pomoći u smanjenju postoperativnog bola nakon endodontskog tretmana.

KONTRAINDIKACIJE

Preosetljivost na hidrokortizon acetat ili na bilo koju komponentu formulacije.

INDIKACIJE

Trajno začepljenje endodontskih kanala trajnih zuba sa sistemskim uvođenjem gutaperka štapića.

NEŽELJENA DEJSTVA

Rizik od alergije na bilo koju komponentu, posebno u dodiru sa desnama.

UPUTSTVO ZA UPOTREBU

Tretirani zub je potrebno izolovati (upotrebom rolnice vate ili koferdama). Nakon pažljivog oblikovanja kanala, njegovog čišćenja antiseptičnim rastvorom, ispiranja i sušenja papirnim štapićima, pripremite pastu za kanal *ex tempore*, postepeno dodajući prah u tečnost (eugenol ili ENDOMETHASONE liquid) u odnosu 2 pune kašičice praha na 3-6 kapi tečnosti, sve dok pasta ne dobije potrebnu konzistenciju za odabranu tehniku punjenja:

- upotreba nosača paste (začepljenje jednog konusa)
- i/ili obloga gutaperka štapića (lateralna i vertikalna kondenzacija)

Zatim umetnite jedan ili više gutaperka štapića prethodno podešenih prema obliku i veličini korenskog kanala.

Napravite rendgenski snimak kako bi ste bili sigurni da su korenski kanali temeljno ispunjeni.

Čvrsto zatvorite bocu nakon svake upotrebe.

Za informaciju:

- za bočicu od 14g, maksimalna procenjena doza dve pune kašičice je 33;
- za bočicu od 42g, maksimalna procenjena doza dve pune kašičice je 99.

Svu neiskorišćenu pastu je potrebno baciti.

INTERAKCIJE

Ne koristiti u kombinaciji s kompozitnim materijalima jer preparati na bazi eugenola sprečavaju njihovu polimerizaciju.

POSEBNA UPOZORENJA I MERE PREDOSTROŽNOSTI

PRILIKOM UPOTREBE

Kao i kod svakog drugog punioca korenskih kanala, kanal se može zatvoriti samo ako je ranije bio temeljno obrađen razvrtačem, očišćen i dezinfikovano.

Odredite radnu dužinu korenskog kanala pre punjenja da bi se sprečila bilo kakva apikalna ekstruzija s obzirom da se pasta ne može resorbovati.

Preporučuje se da se ne premaši 2 mm od apeksa.

Zbog elektrostatike, ENDOMETHASONE N prašak, kao i svaki prašak, ima tendenciju da se aglomerizuje u boci. Međutim, kapacitet koji je naveden na etiketi odgovara merenom sadržaju. Zato je bitno pre upotrebe bocu promućkati kako bi se prašak oslobodio.

Kašičica se daje za upotrebu samo uz ovaj proizvod.

Nemojte ponovo koristiti kada je bočica ispražnjena. Pre upotrebe, osigurajte da je kašičica čista i u skladu sa dobrom zubarskom praksom.

Opasnost (sadrži timol jodid).

Štetan je ako se proguta.

Uzrokuje teške opekotine kože i oštećenje oka.

Vrlo toksično za vodenu sredinu na koju ostavlja dugotrajni efekat.

Pogledati sigurnosti tehnički list (dostupan na zahtev).

ČUVANJE

Čuvati na temperaturi do 25°C i zaštićeno od vlage.

PAKOVANJE

- Bočica od 14g praška + 1 kašičica
- Bočica od 42g praška + 1 kašičica

SAMO ZA PROFESIONALU UPOTREBU

Proizvođač:

Septodont,
58, rue du Pont de Créteil,
94107 Saint-Maur-des-Fossés Cedex,
Francuska

Ovlašćeni predstavnik proizvođača:

Polifarm d.o.o. Beograd,
Zlatiborska 2V, 11160 Beograd

Broj Rešenja: 515-02-03144-19-003 od 17.12.2019.

