

MASTER-DENT®

PIT & FISSURE SEALANT

SVETLOSNO-POLIMERIZUJUĆI

PIT&FISSURE SEALANT

Svetlosno-polimerizujući

UPUTSTVO ZA UPOTREBU:

PREPORUČENE INDIKACIJE:

Master-Dent® svetlosno-polimerizujući zalivač fisura je dizajniran kao preventiva za zatvaranje pukotina u gleđi zuba kako bi se smanjila pojava karijesa naročito na okluzalnim površinama mlečnih i stalnih molara i premolara.

KONTRAINDIKACIJE:

Poznate alergije na bilo koju komponentu.
Ne primenjivati u slučaju karijesa.

SASTAV:

Ovaj proizvod sadrži:
Metakrilatne smole
Amorfni silicijum
Foto inicijatori

OBLICI PROIZVODA:

Početni set: 2x7ml bočice TRANSPARENTNI #12-103
Set špriceva: 4x1,2 g , 9g kiselina TRANSPARENTNI #12-155


UPUTSTVO ZA UPOTREBU:

Priprema zuba

1. Uraditi profilaksu sa pastom koja ne sadrži ulja i fluoride.
2. Izolovati i osušiti svaki zub koji treba da bude izolovati bezuljanim vazduhom.
3. Naneti Master-Dent® kiselinu u gelu (37%) 60 sekundi.
4. Isprati dobro i isušiti. Ukoliko nije prisutan poznati izgled poput krede, ponovite tretman kiselinom.
5. Ukoliko koristite opakne nijanse u bočici, snažno protresite bočicu 10 do 20 sekundi kako bi osigurali da je proizvod temeljno izmešan.

NANOŠENJE

1. Naneti tanak sloj Pit&Fissure zalivača na suhu, nagriženu gleđ.

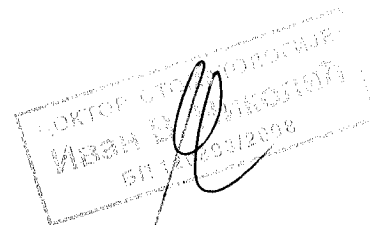

2. Koristeći svetlo za polimerizaciju dentalnog materijala, izložite sve premazane površine, držeći svetlo 1-2mm od površine.
3. Nakon polimerizacije zalivača, obrišite površinu vaterolnom. Proverite tvrdoću i zadržavanje.

UPOZORENJE:

Medicinska sredstva treba držati van domašaja dece.

Izbegavajte direktno gledanje u svetlo za polimerizaciju tokom polimerizacije Master-Dent®Pit&Fissure zalivača. Nosite zaštitne naočare.

Čuvanje:



Čuvati dalje od izvora svetlosti, na tamnom mestu. Pratiti temperaturu čuvanja. Zaštititi od vlage. Rok važenja 2 godine.

BEZBEDNOSNE MERE:

U slučaju kontakta sa očima, isprati velikom količinom vodom. Potražiti savet medicinskog osoblja ukoliko se iritacija zadrži.

Kod gutanja, indukovati povraćanje ukoliko su progutane velike količine materijala.

U slučaju kontakta sa kožom, isprati vodom i sapunom.

CE
0086



Dentonics, Inc.
2833 Tophill Rd.
Monroe, NC 28110
www.dentonics.com



INSYZOR
76 Windsor Drive,
Yate, Bristol, BS37 5DY, UK
insyzor@ymail.com

Pažnja:

Savezni zakon ograničava prodaju ovog sredstva samo za i po nalogu stomatologa ili stručnog lica u stomatologiji

